

# CORRECCIÓN DE UÑAS SIN DOLOR



onyfix®

# PRESENTACIÓN




- El sistema de corrección de uñas Onyfix ® es un producto sanitario diferente e innovador, que se utiliza para el tratamiento sin dolor de uñas involutas e incarnadas .
- **Onyfix® composite**, es un material sintético mezclado heterogéneamente formando un compuesto: de **cohesión y de refuerzo**. El componente de cohesión Onyfix® Primer envuelve y une los componentes de refuerzo, Onyfix® Hard/Soft, manteniendo la rigidez y posición de estos.
- Esta combinación de materiales confiere al compuesto de unas propiedades mecánicas notablemente superiores a las de las materias primas de las que procede
- Se fija a la forma proximal de la uña y vuelve a su forma natural a través del crecimiento fisiológico
- Funciona sin tensión ni presión
- Sin dolor y prevención de recaídas
- Combinable con otros sistemas
- **El composite está específicamente desarrollado para podólogos**, basado en un compuesto de corrección que se ha utilizado en el sector de la tecnología médica durante 30 años = máxima seguridad




# APLICACIÓN




Preparar

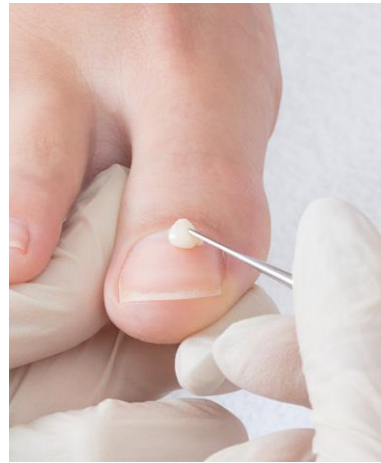

Aplicar

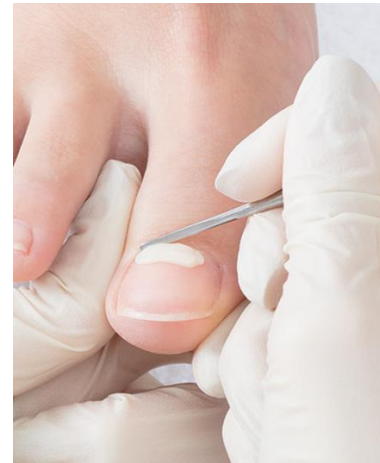

Modelar

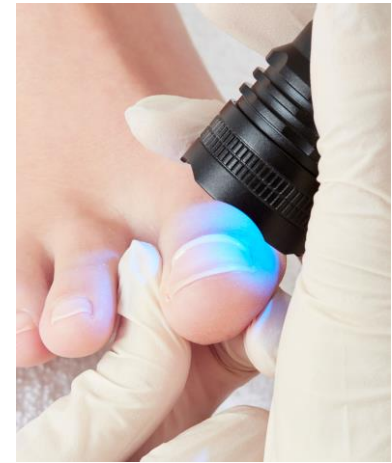

Secar

## APLICACIÓN

Se fija a la forma proximal de la uña y vuelve a su forma natural a través del crecimiento fisiológico

¿Qué significa esto?

Situación inicial




## APLICACIÓN

Se fija a la forma proximal de la uña y vuelve a su forma natural a través del crecimiento fisiológico.

¿Qué significa eso?


Después de aprox. 10 semanas

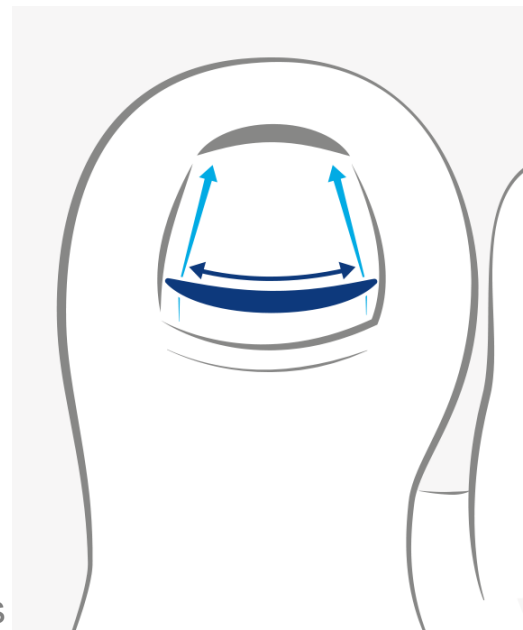

## APLICACIÓN

Se fija a la forma proximal de la uña y vuelve a su forma natural a través del crecimiento fisiológico.

¿Qué significa eso?

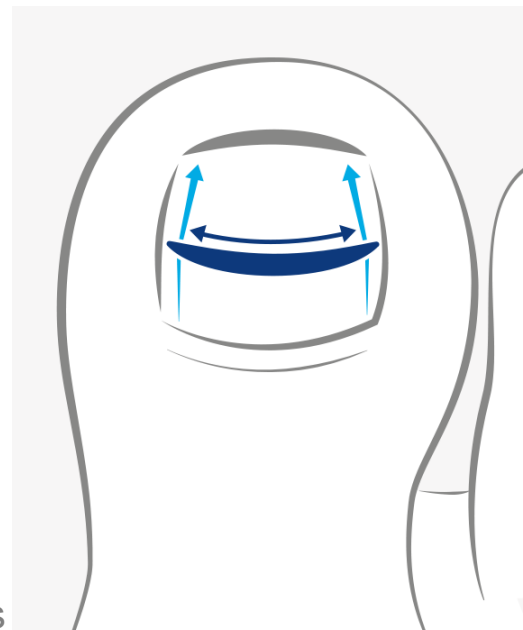

Después de aprox. 20 semanas

## APLICACIÓN

Se fija a la forma proximal de la uña y vuelve a su forma natural a través del crecimiento fisiológico.

¿Qué significa eso?

Después de aprox. 30 semanas



## ONYFIX® PRIMER



- Actua como agente de adhesión
- Aplicar una gota con bastoncillo de algodón uniformemente
- Secar con lámpara de luz azul LED (420-430 nm, 1w/cm<sup>2</sup>) durante 20 segundos
- 80 tratamientos



## ONYFIX® SOFT



- Para uñas pequeñas, finas, delgadas y para niños
- Fijar una cánula a la jeringa, aplicarlo en la uña, moldear con espátula
- Secar y endurecer con lámpara de luz azul LED 30 segundos.
- 40 tratamientos

## ONYFIX® HARD




- Para uñas grandes y deformadas
- Aplicar una pequeña cantidad sobre la uña y dar forma con espátula
- Para obtener mejores resultados aplicar con un espesor de 2 mm
- Endurecer con luz azul LED durante 30 segundos.
- 40 tratamientos

# EFICACIA

## TIEMPO REQUERIDO DE APLICACION


$t_0$  = Comienzo  
 $t_1$  = después de 6 semanas  
 $t_2$  = después de 12 semanas  
 $t_3$  = después de 18 semanas

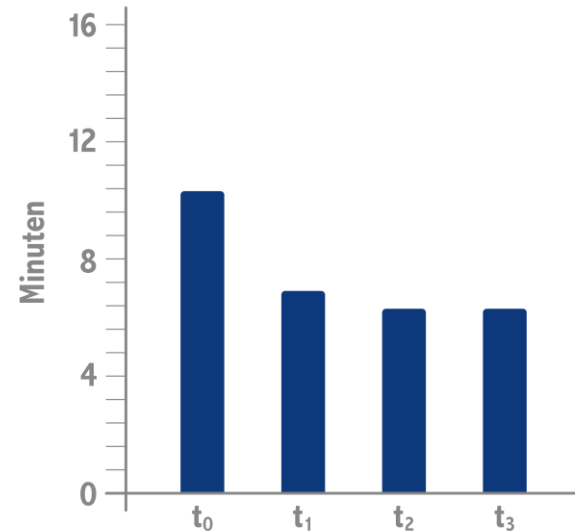

## EFICACIA


0 = SIN DEFORMIDAD DE LA UÑA; 10 = FUERTE DEFORMACION

- $t_0$  = Comienzo
- $t_1$  = después de 6 semanas
- $t_2$  = después de 12 semanas
- $t_3$  = después de 18 semanas
- $t_4$  = después de 24 semanas

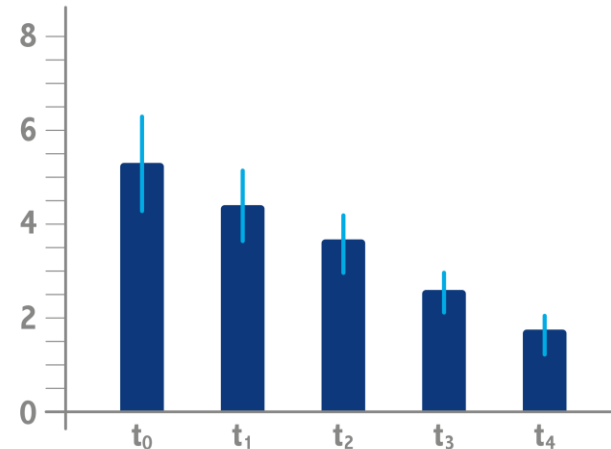

# EFICACIA

## EXPERIENCIA DE DOLOR EN EL GRUPO DE PRUEBA

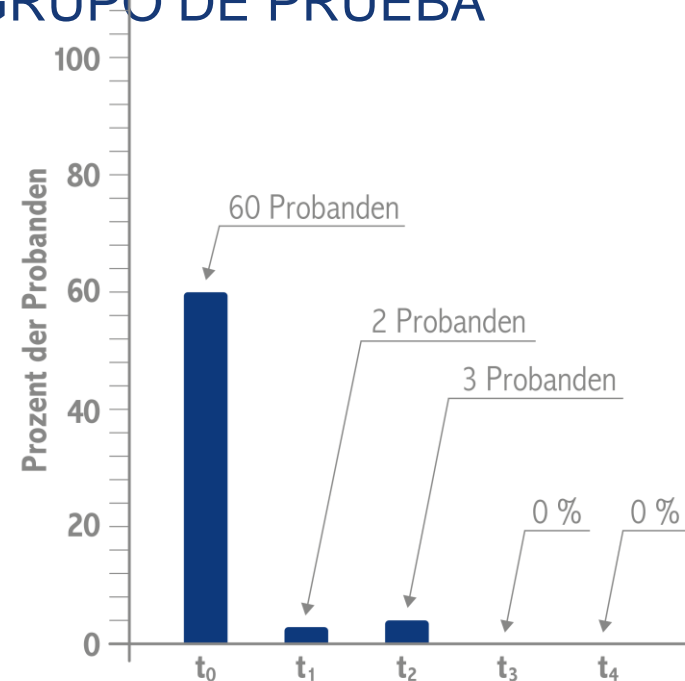

t<sub>0</sub> = Comienzo

t<sub>1</sub> = después de 6 semanas

t<sub>2</sub> = después de 12 semanas

t<sub>3</sub> = después de 18 semanas

t<sub>4</sub> = después de 24 semanas

## EFICACIA

### EFICACIA DE ONYFIX® SISTEMA DE CORRECCION

0 = SIN EFECTO

10 = EFECTO OPTIMO


$t_0$  = Comienzo

$t_1$  = después de 6 semanas

$t_2$  = después de 12 semanas

$t_3$  = después de 18 semanas

$t_4$  = después de 24 semanas

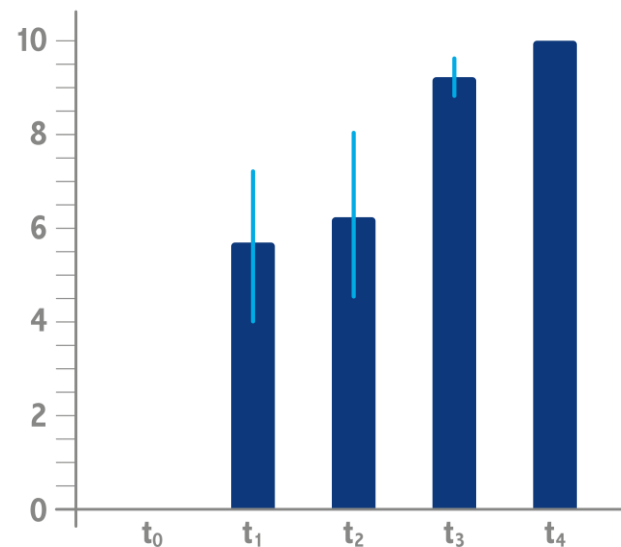

## EFICACIA ONYFIX® HARD



Comienzo



Después de 12  
semanas



Después de 17  
semanas



Después de 33  
semanas

## EFICACIA ONYFIX® HARD



Comienzo



Después de 24  
semanas



Después de 36  
semanas



## EFICACIA ONYFIX® HARD



Comienzo



Después de 6  
semanas



Después de 12  
semanas



Después de 18  
semanas

## EFICACIA ONYFIX® SOFT



Comienzo



Después de 6  
semanas



Después de 12  
semanas



Después de 18  
semanas

# CONCLUSIÓN

- Nuevo
- Eficaz
- Estético
- Sin dolor
- Fisiológico
- Versatil y compatible
- Seguro, duradero
- Económico
- Se puede realizar cualquier deporte y actividad
- Recomendado para pacientes diabéticos
- Apto a partir de 4 años





**onyfix®**



Distribuido por:

**ABALON+PHARMA**  
LABORATORIO FARMACEUTICO

[info@abalonpharma.com](mailto:info@abalonpharma.com)